

Lea este folleto completo de información cuidadosamente antes de utilizar Multi-Gyn FloraPlus y guárdelo como referencia.

Multi-Gyn FloraPlus

- + Alivia la picazón, irritación, olores y secreciones
- + Previene los problemas vaginales por hongos levaduriformes
- + Soporte prebiótico de una flora vaginal normal
- + Previene la candida (recurrente)
- + Estimulación prebiótica de la flora de lactobacilos
- + Optimiza el valor de pH vaginal (acidez)

¿Cómo funciona Multi-Gyn FloraPlus?

Multi-Gyn FloraPlus es un producto natural, basado en el complejo patentado bioactivo 2QR en combinación con componentes prebióticos. Los prebióticos son componentes nutritivos en FloraPlus que dan soporte al crecimiento de los lactobacilos beneficiosos. Multi-Gyn FloraPlus optimiza la flora vaginal y el valor de pH.

El complejo 2QR es una sustancia natural derivada de plantas y consiste de polisacáridos bioactivos. Tiene la habilidad única de bloquear la adhesión de bacterias dañinas lo cual neutraliza efectivamente estas bacterias de forma natural. El efecto natural prebiótico y de bloqueo es seguro e inocuo porque no está basado en sustancias tóxicas ni químicos agresivos. Por lo tanto, no hay efectos colaterales conocidos. Esta combinación única hace de Multi-Gyn FloraPlus el producto ideal para una vagina saludable.

Multi-Gyn FloraPlus balancea su flora vaginal al dar soporte al desarrollo de lactobacilos beneficiosos (bacterias de ácido láctico). Multi-Gyn FloraPlus crea una flora óptima y natural que previene las molestias relacionadas con el crecimiento excesivo de microorganismos indeseados tales como la candida. Por lo tanto FloraPlus es altamente efectivo en la prevención de problemas vaginales (recurrentes). Alivia de forma efectiva las molestias tales como secreciones, picazón, irritaciones, olores, enrojecimiento y sensibilidad.

FloraPlus se recomienda para:

- Picazón, irritación, olores y secreciones (tales como las causadas por flora vaginal alterada)
- Flora vaginal alterada/desbalanceada debido a menstruación, actividad sexual, natación, antibióticos, problemas de salud, etc.

Ingredientes:


Agua, complejo 2QR (copolímero de ácido poliglucurónico - Galactoarabinano), prebióticos, humectantes: goma xantana y caprililglicol, espesante: hidroxipropilmetilcelulosa, reguladores de la acidez: ácido láctico e hidróxido de sodio, conservantes: Dermosoft 1388 (glicerina, agua, ácido levulinico, hidróxido de sodio, ácido p-Anisínico) y natamixina.

*Complejo 2QR: polisacáridos bioactivos patentados. www.2QR.com


Multi-Gyn FloraPlus es un producto natural basado en el complejo 2QR patentado. Esta sustancia natural es derivada de las plantas y consiste de polisacáridos bioactivos con efecto natural de barrera. Este efecto de bloqueo es completamente seguro e inocuo porque no está basado en sustancias tóxicas o químicos fuertes. Por lo tanto no tiene efectos secundarios negativos. Multi-Gyn FloraPlus no contiene perfume, ingredientes de origen animal, químicos fuertes ni conservadores. Multi-Gyn FloraPlus ayuda a mantener la acidez óptima vaginal por tener pH balanceado respecto a la flora natural.

Aplicación


Multi-Gyn FloraPlus es un gel vaginal prebiótico que se inserta en la vagina. Cada tubo corresponde a una cantidad de única aplicación. El gel vaginal prebiótico se aplica directamente en la vagina con un aplicador de contorno especial. Elimine el tubo después de su utilización. Vea las instrucciones de uso del tubo de aplicación única en los dibujos a continuación.

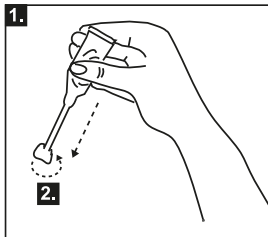


1. Agite el contenido del tubo contra la punta del tubo.
2. Rompa la punta del tubo girándolo.

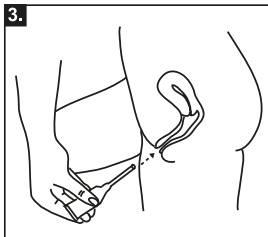

3. Inserte suavemente el extremo delgado del aplicador (del tubo) en la vagina.

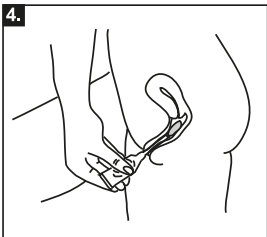

4. Presione suavemente el tubo para aplicar el gel dentro de la vagina.

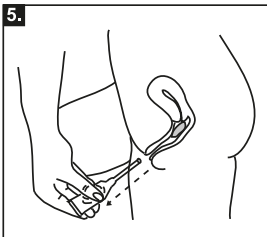

5. Continúe presionando a la vez que remueve.

Modo de uso:

- Para el alivio directo de picazón, irritación vaginal, olores o secreciones: use un tubo de aplicación única cuando requiera alivio de dichos síntomas.
- Para la prevención de problemas vaginales (tales como infecciones recurrentes por hongos levaduriformes), para dar soporte a lactobacilos beneficiosos y para mantener la flora normal use un tubo de aplicación única cada 3 días.

Multi-Gyn FloraPlus no debe ser usado por más de 30 días consecutivos, esto permite que la flora vaginal se regule a sí misma sin soporte. En caso de molestias persistentes o recurrentes usted siempre debe contactar a su médico.

Tenga en cuenta

Después de la aplicación usted puede experimentar una sensación de calor y cosquilleo. Esta sensación es normal y desaparecerá rápidamente.

Advertencias:

Las alergias a los ingredientes del Multi-Gyn FloraPlus son muy raras. Cuando tenga dudas aplique un poco del gel en la parte interna del brazo. Cuando aparece un punto rojo que pica, le recomendamos no usar Multi-Gyn FloraPlus.

Debido a que Multi-Gyn FloraPlus tiene una acidez óptima para la vagina (bajo pH) y el esperma es alcalino, el uso de Multi-Gyn FloraPlus puede reducir la actividad del esperma. Por la tanto Multi-Gyn FloraPlus no debe ser usado en horas previas o después de la relación sexual cuando desee quedar embarazada.

Interferencia con medicamentos

Multi-Gyn FloraPlus no tiene interferencias conocidas con medicamentos.

Embarazo y lactancia

No hay evidencias de su uso en mujeres embarazadas o en período de lactancia. Se recomienda consultar a su médico.

Condiciones de conservación

Se aconseja mantener a temperatura ambiente, entre 10 y 25°C. Mantener fuera del alcance de los niños.

Color del gel

El gel puede variar un poco en color; desde transparente a ámbar claro. Esto se relaciona con el ingrediente activo principal, el complejo 2QR, el cual es un ingrediente natural y por lo tanto puede tener pequeñas variaciones en el color. Esto no afecta la eficacia o seguridad del producto.

Información de antecedentes

En la vagina, las bacterias de la flora normal conocidas como lactobacilos, mantienen a la mayoría de las bacterias indeseadas y otros microorganismos bajo control. La alteración de este balance usualmente se nota por un cambio en las secreciones vaginales. Las más comunes son el crecimiento bacteriano en exceso conocido como vaginosis bacteriana (V.B.) y los problemas por hongos levaduriformes (cándida, aftas). La vaginosis bacteriana está generalmente acompañada de un olor a "pescado" y los problemas por hongos levaduriformes están acompañados de comezón, sensación de ardor y una secreción blanca espesa.

<http://www.multi-gyn uy/>

M. Esguena, Colombo
Asistente Técnico

Nota: EL tubo fue diseñado para aplicar la cantidad recomendada de gel. Cuando se usa como se instruye, puede quedar una pequeña cantidad remanente en el tubo.

Importa Cipharma (Faminter S.A.)
Rambla Republica de México 5871 of 02
Tel/Fax: 2605 8410 - 2605 8411
Montevideo, Uruguay Reg. MSP Nº 69127

Fabricado por:
BioClin BV, Delftechpark 55,
2628 XJ, Delft, Países Bajos